



## **ANWENDUNGSHINWEIS PEP-SET**

### **PURE EFFICIENCY PHACO**


- Schrauben Sie die Ultraschallspitze mit dem Schlüssel auf den Ultraschallhandgriff. Beim Anziehen der Ultraschallspitze beachten Sie den korrekten Sitz des Schlüssels auf der Ultraschallspitze. (Bei unvorsichtiger Handhabung kann die Ultraschallspitze Material am Schlüssel abtragen. Prüfen Sie die Ultraschallspitze vor der Verwendung auf Rückstände.)

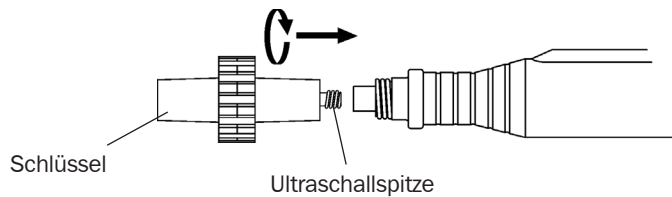

- Drehen Sie den Infusionsaufsatz über die Ultraschallspitze auf den Ultraschallhandgriff, bis er bündig an die Auflagefläche am Ultraschallhandgriff anstößt.

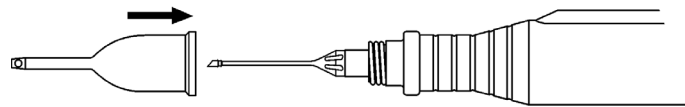


Bei richtiger Positionierung steht die Spitze des Infusionsaufsatzes hinter dem Kopf der Ultraschallspitze. Achten Sie darauf, das Infusionsrohr des Infusionsaufsatzes nicht mit der Spitze der Ultraschallspitze zu beschädigen.

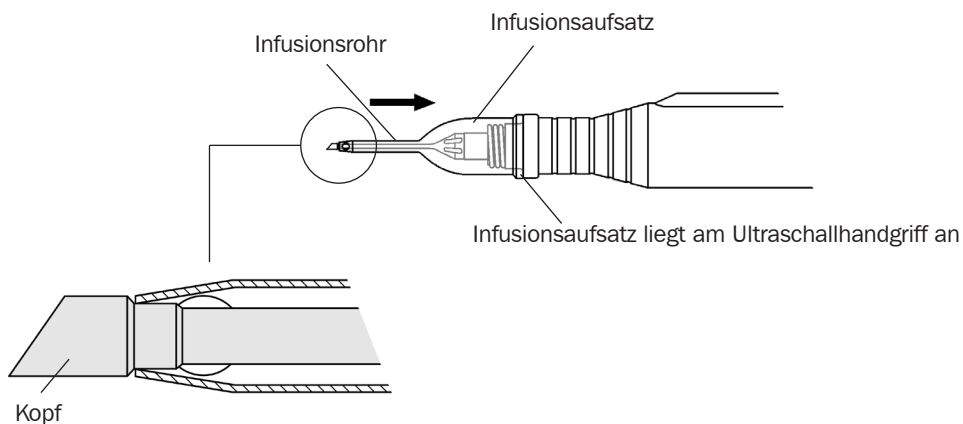

#### **ACHTUNG:**

**Prüfen Sie unter dem Mikroskop den korrekten Sitz des Infusionsaufsatzes. Prüfen Sie, dass sich keinerlei Materialabtragungen von Schlüssel oder Infusionsaufsatz an der Ultraschallspitze befinden. Sollte dies der Fall sein, ist eine umgehende Reinigung erforderlich oder ein neues PEP-Set zu verwenden.**

- Stecken Sie die Testvorderkammer bis zum Bund auf den Infusionsaufsatz.

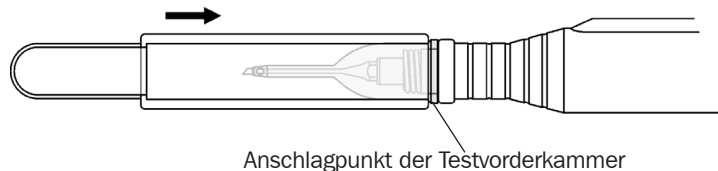

- Das PEP-Set ist vorbereitet. Verbinden Sie den Handgriff mit dem Ultraschallgerät und führen Sie die erforderlichen Tests durch.